


Instructions pour le prélèvement d'échantillon cervical à l'aide de spatule, brosse cervicale (cytobrosse) et du milieu de collecte de cellules pour PCR cobas®

Destiné à la détection du Virus du Papillome Humain (test cobas® VPH)

Protocole pour la spatule et la brosse endocervicales


(Non incluses avec le milieu, doivent être commandées séparément)

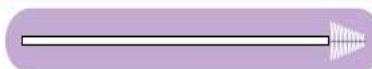


- OBTENTION :**
- Placez la spatule contre le col de l'utérus
 - Poussez doucement la spatule et faites-la tourner une fois autour de la portion intra-vaginale du col de l'utérus
 - Retirez la spatule



- RINÇAGE :**
- Rincez la spatule aussi rapidement que possible dans le tube de solution en la faisant tourner dix fois vigoureusement
 - Jetez la spatule

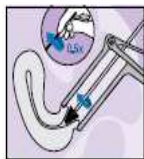

- OBTENTION :**
- Insérez la brosse dans le col de l'utérus
 - Faites-la lentement tourner d'un quart de tour ou d'un demi-tour dans un sens (Afin de réduire les saignements superflus, NE PAS TROP TOURNER la brosse)
 - Retirez la brosse

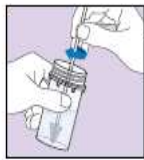

- RINÇAGE :**
- Rincez la brosse aussi rapidement que possible en la faisant tourner dix fois dans la solution tout en l'appuyant contre la paroi du tube
 - Faites tourner la brosse vigoureusement afin de libérer le matériau
 - Jetez la brosse

- FERMETURE :**
- Serrez bien le bouchon de façon que la ligne de pression de serrage du bouchon dépasse celle du flacon.



Transport : entre 2°C et 30°C • **Stabilité du prélèvement :** 6 mois

Précautions de manipulations:

Utiliser avec soin afin d'éviter les éclaboussures.